

Guida testuale

Introduzione.

Ciao a tutti, sono Alberto Zanetti da Modena.

In questo Guida vi mostro come collegare e utilizzare la barra braille **Lilli V3** con iPhone, tramite VoiceOver e Bluetooth.

Inoltre, vedremo come creare e personalizzare dei comandi sulla barra braille per rendere la navigazione più veloce ed efficace.

Collegare la barra braille Lilli V3 a iPhone.

1. Apri **Impostazioni**.
2. Vai su **Accessibilità**.
3. Entra in **VoiceOver**.
4. Scorri fino alla sezione **Braille** e aprila.
5. Attiva l'opzione **Scegli uno schermo braille**.
6. Nella lista dei dispositivi comparirà il nome della tua barra braille, ad esempio *Lilli V3*.
7. Esegui un **doppio tap** sul nome per connetterla.

Una volta collegata, la barra sarà pronta all'uso.
Ricorda che puoi anche abilitare la connessione automatica attivando l'opzione **Abilita Bluetooth all'avvio di VoiceOver**.

Creare un comando personalizzato con la Lilli V3.

Una funzione molto utile è la possibilità di assegnare **comandi personalizzati** ai tasti della barra braille.

Ecco come fare:

1. Vai in **Impostazioni** → **Accessibilità** → **VoiceOver** → **Comandi**.
 2. Apri la sezione **Dispositivi braille**.
 3. Seleziona la tua barra braille (*Lilli V3*).
 4. Ti troverai davanti a varie categorie di comandi (Dispositivo, Interazione, Tastiera, Navigazione, Rotore, VoiceOver).
 5. Entra in **Navigazione**.
 6. Scegli l'azione a cui vuoi assegnare un comando (es. *Immagine precedente* o *Immagine successiva*).
 7. Tocca **Assegna nuovi tasti braille**.
 8. Premi la combinazione di tasti desiderata sulla barra braille.
-

Esempi di comandi creati.

- **Immagine precedente** → **Punti 3 + 5 + 7 + Spazio**.
- **Immagine successiva** → **Punti 3 + 5 + 8 + Spazio**

⚠ **Attenzione:** se una combinazione è già usata da un altro comando, apparirà un messaggio di avviso. In quel caso, scegli un'altra combinazione libera.

Conclusione

Con la barra braille **Lilli V3** puoi non solo leggere e scrivere, ma anche creare comandi personalizzati che rendono la navigazione più rapida e comoda.
Basta un po' di pratica per configurarla a seconda delle proprie esigenze.

Buon divertimento con la barra braille!

Dalberto Zanetti